


**Algemeen**

De Medicare klepset is een mechanisch schakelblokje tussen 2 (of meer) lagedruk gasbronnen. Het wordt gebruikt om, door middel van andere medische apparatuur zoals bijv. anesthesie toestellen, medisch gas naar de patiënt te leiden. De klepset maakt het mogelijk dat gas kan worden aangeboden via bijv. een gasafnamepunt of een, op een cilinder gemonteerd reduceerventiel. De hoogste druk van de verschillende gasbronnen bepaalt welke gastoevoer (of via het gasafnamepunt in de muur, dan wel via het reduceerventiel) zal plaatsvinden. Door sluiting van de terugslagklep wordt terugstroming naar de andere gasbron voorkomen.

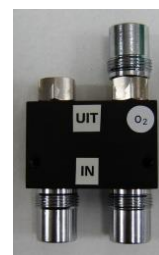

**Technische specificaties:**

Werkdruk	4-6Bar
Markering	In- en uitgang zijn aangegeven
Gassoort	O2 of Lu/Air
Afmeting	60 x 40 x 30 mm (LxHxB)
Normen	EN 15908 en ISO 15223-1
gebruikstemperatuur	0 tot + 40°C.
opslagtemperatuur	-20 tot + 60°C

**Gebruik:**

De ingangen van de klepset worden aangesloten aan de verschillende gasbronnen. De uitgang van de klepset wordt aangesloten aan het te gebruiken apparaat door middel van een slangstel.

Indien u voorkeur heeft voor gastoevoer:

- uit de **muur**: koppel het gasafnamepunt en draai de cilinder van de gasfles dicht.
- uit de **gasfles** (bijv. omdat de patiënt moet worden vervoerd): draai de cilinder van de gasfles open en ontkoppel het apparaat van het gasafnamepunt.
- Controleer of de klepset niet beschadigd is
- Controleer of de klepset schoon is
- Zorg dat de juiste gassoort wordt aangesloten. Zie vermelding gassoort op het apparaat
- Controleer na aansluiting op gasbron en apparaat of er lekkage optreedt. Indien ja, ontkoppel en draai de cilinders dicht. Verhelp de lekkage en voer lekkagetest nogmaals uit voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

Het gebruik is voorbehouden aan daartoe opgeleid personeel. Dit personeel moet voor gebruik op de hoogte zijn van de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

**Reinigen/Desinfectie / Sterilisatie:**

- De klepset kan met huishoudelijk reinigingsmiddel worden gereinigd.
- Dompel het niet onder in water en de klepset kan niet worden geautoclaveerd of gesteriliseerd.
- Het product is niet steriel en is voor meervoudig gebruik geschikt.
- Er zijn geen speciale voorschriften voor opslag. Wel raden wij u aan het stofvrij en liefst in originele verpakking op te slaan.

**Onderhoud:**

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 10 jaar.

Reparatie en of vervanging van onderdelen is voorbehouden aan door MEDICARE UITGEEST B.V. geautoriseerd personeel. Te gebruiken verbruiksonderdelen en de wijze van vervanging.

aanbevolen vervanging:	Artikelnummer
O-ring 1,78x1,78 (2 stuks)	54017817
O-ring 5x2	5450200

overige onderdelen:	Artikelnummer
Sluistring (2 stuks)	44215120

Gebruik geen vet, olie of andere smeermiddelen

**Garantie:**

1 Jaar op onderdelen en arbeidsuren, met uitzondering van schade of ongelukken door onzorgvuldig of onkundig gedrag, misbruik van product of slecht uitgevoerd onderhoud.

Contractuele levensduur: 10 jaar.

**Belangrijk:**

- Controleer of dit product voldoet aan de product- en/of interne eisen en het correct en volledig veilig kan functioneren **voor** ingebruikname.
- Gasbronnen naar klepset eerst afsluiten **voor** ontkoppelen en klepset ontluften.
- Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling.
- Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.