



Wandrail systeem:

Railklem systemen maken het mogelijk dat medische apparatuur zoals flowmeters, vacuümapparaten dicht bij de patiënt geplaatst kan worden. Ze kunnen worden gemonteerd op verschillende locaties in de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis, ambulances en op andere hulpmiddelen zoals trolleys, bedden, ventilatoren. De railklem zorgt ervoor dat de apparatuur met de patiënt van de ene locatie naar de andere verplaatst kan worden. Medische apparatuur kan worden aangesloten met een railklem op een rail waarvan de afmetingen zijn vastgelegd in een internationale norm. Dit product wordt geleverd volgens NEN-EN-ISO 19054.


Gebruik:

Installatie en gebruik zijn voorbehouden aan daartoe opgeleid personeel.

Onderhoud:

Aanbevolen wordt: controleer minimaal 1x per jaar alle bevestigingspunten op correcte bevestiging. Voor reparatie en of vervanging van onderdelen neemt u contact op met Medicare Uitgeest BV.

Rail voor bevestiging van apparatuur voorzien van railklem. Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Geschikt voor montage aan muur, wand of op apparatuur. Standaard voorzien van bevestigingsgaten. Na bevestiging van de muursteen (zie tabel bevestiging) wordt de rail met M6 inbuschroeven gemonteerd op de muursteen.

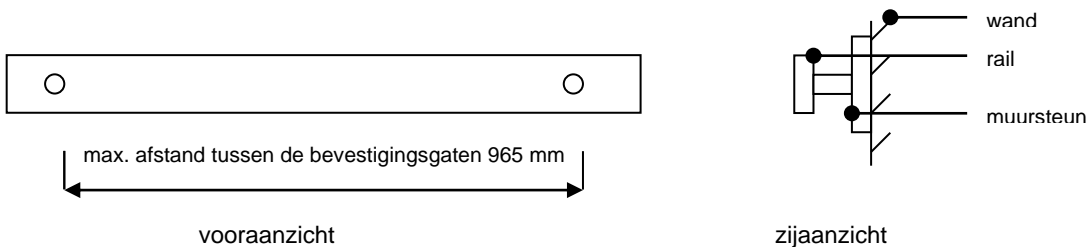

Specificatie:

maximale belasting:	80 kg	materiaal rail:	geanodiseerd Al 51 ST
maximale torsie:	100 N.m	materiaal muursteen:	geanodiseerd Al 51 ST

Bevestiging:

Material	diameter schroef/ bout	soort bevestiging	minimale diepte	opmerking:
Beton	min. 6 mm.	plug	min. 60 mm	
Hout	min. 6 mm.	geen	min. 60 mm	
Gips	min. 6 mm.	paraplu	min. 60 mm	dubbel wandig
Metal	min. 6 mm.	borgmoer	afh. beschikbaar	steunstrip

Reiniging:

Gebruik om de rail en muursteen te reinigen alleen huishoudelijke middelen.

Controle op correcte bevestiging:

Controleer met een gewicht van >40 kg, op 250 mm afstand van de rail, op het loskomen van de rail of de muursteunen ten opzichte van de muur of wand, waarop de rail is bevestigd.

Belangrijk:

Controleer of dit produkt voldoet aan de produkt- en of interne eisen **voor ingebruikname**.
Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling.