


Gebruikshandleiding Med-Klem

De Med-Klem infuuspaalklem is een eenvoudig te monteren hulpstuk dat de infuuspaal en het bed (of de rolstoel) aan elkaar koppelt gedurende het vervoer van de patiënt. De Med-Klem heeft 2 uiteinden met gelijke werking welke in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd. De infuuspaal rijdt mee met het bed en steunt met de wielen op de vloer.

Gebruik: Voorbehouden aan daartoe geïnstrueerd personeel.
Controleer de strip en gesp op beschadigingen voor ingebruikname.

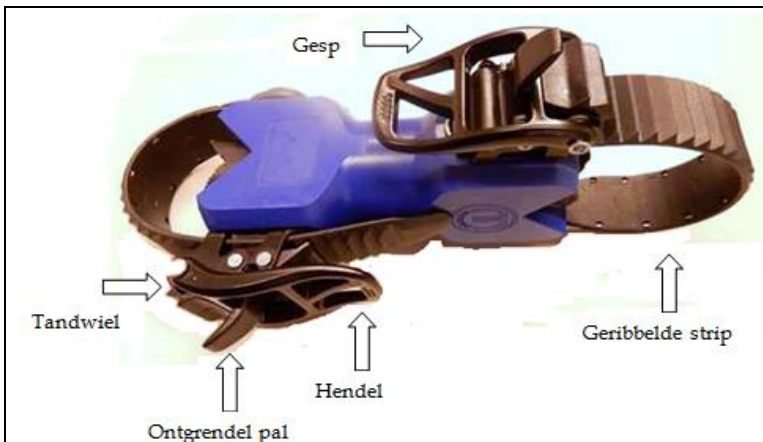

Bevestigen strip:
Bevestig de Med-Klem eerst aan de steun van het bed en dan aan de infuuspaal i.v.m. hoogte van de klem.

1. Leg de geribbelde strip om de steun van het bed en duw de geribbelde strip in de opening onder de gesp. Let er hierbij op dat de gesp naar binnen toe is vastgezet.
2. Duw de strip helemaal aan totdat deze niet verder kan.
3. Duw de hendel omhoog om de strip nog vaster om de steun te bevestigen (tandwiel pakt volgende ribbel in de strip).
4. Herhaal deze actie enkele keren totdat de klem niet meer kan ronddraaien om de steun.
Herhaal stap 1 t/m 4 bij de infuuspaal.

Losmaken strip:
De Gesp bestaat uit een Hendel, Ontgrendel pal en Tandwiel.
Klik de kleine ontgrendelpal in de gesp **omhoog** en druk de geribbelde strip licht naar beneden. Trek de strip rustig onder het tandwielje door (zie foto).

! Let goed op de juiste hoogte van de infuuspaalklem. Als deze scheef zit, kan dit de veilige fixatie beïnvloeden.

Technische specificaties:

Dit product wordt geleverd conform eisen voor producten klasse I van de Medische Richtlijn 93/42/EEC 1993.

Onderdeel	Materiaal
Materiaal blok	Kunststof
Materiaal gesp	Kunststof, aluminium en rvs
Afmeting lxb	18x9 cm
Gewicht	345 gram

Reinigen/Desinfectie/Sterilisatie:

De Med-Klem dient met een huishoudelijk product gereinigd te worden. Gebruik geen alcohol of sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn om vloeren schoon te maken. Het product niet onderdompelen, steriliseren of autoclaveren.

Onderhoud of reparatie:

Voor dit product is geen preventief onderhoud voorzien. Bij slijtage is vervanging van bepaalde onderdelen mogelijk (strip en gesp) en deze kunnen als reparatieset worden nabesteld bij Medicare onder artikelnummer 05000251.

Garantie:

Op het blok geldt een garantie van een jaar. De strip en gesp vallen niet onder garantie (zie onderhoud of reparatie).

Belangrijk:

- Controleer of dit product voldoet aan de product- en/of interne eisen **voor** ingebruikname.
- Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling.
- Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.